

WELLSAMED

GUTTAPERCHASPITZEN



GEBRAUCHSANWEISUNG

Guttaperchaspitzen

Handgerollte (endodontische) Guttperchaspitzen

Zum Füllen eines aufbereiteten Wurzelkanals vor einer Zahnrestauration

Zusammensetzung

Guttapercha, Zinkoxid, Bariumsulfat, Farbstoff

Anwendung

- Überprüfen Sie, ob das Produkt beschädigt ist, ob eventuelle Verunreinigungen vorliegen und ob die Form für den Gebrauch geeignet ist.
- Prüfen Sie, ob sich das Produkt innerhalb des Verfallsdatums befindet.
- Nachdem Sie den Wurzelkanal des beschädigten Zahnes behandelt haben, füllen Sie diesen mit der passenden Größe der Guttaperchaspitzen.
- Dieses Produkt ist ein Einwegprodukt und wird nach Gebrauch entsorgt.

Verwendungszweck

- Verwendungszweck: zum Füllen eines aufbereiteten Wurzelkanals vor einer Zahnrestauration.
- Indikation: zum Füllen eines aufbereiteten Wurzelkanals vor einer Zahnrestauration.
- Gegenanzeigen: nicht bei Patienten anwenden, die allergisch auf dieses Produkt reagieren.
- Altersgruppe: für alle Altersgruppen geeignet
- Nur für den zahnärztlichen Gebrauch
- Nebenwirkungen/unerwünschte Wirkungen: Es sind keine Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen bekannt.
- Potenzielles Risiko bei Wiederverwendung: Die Wiederverwendung von gebrauchten Guttaperchaspitzen kann zu Entzündungen führen.
- Kann mit einem Sealer oder Zement verwendet werden und ist unter der Kontrolle des zahnärztlichen Fachpersonals entsprechend der klinischen Indikation zu verwenden.
- Einwegprodukt

Vorsichtsmaßnahmen

- Nur vom zahnärztlichen Fachpersonal zu verwenden.**
- Nicht verwenden, wenn das Produkt abgelaufen ist.**
- Vor der Anwendung sollte der Wurzelkanal auf eine mögliche Infektion hin untersucht werden.**
- Nicht bei Patienten verwenden, die allergisch auf dieses Produkt reagieren.**

Lagerung

Bei Raumtemperatur und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Beseitigung

Entsorgen Sie den Inhalt / Behälter gemäß der entsprechenden Landesvorschriften.

Haltbarkeit

4 Jahre ab dem Herstellungsdatum.

Röntgenopazität

Entspricht 6 mm Aluminium-Stufenkeil.

Symbole	DE
	Verwendbar bis
	Chargenbezeichnung
	Bestellnummer
	Einmalige Produktkennung
	Vor Sonnenlicht und Hitze schützen
	Nur zum Einmalgebrauch
	Nicht steril
	Medizinprodukt
	Gebrauchsanweisung beachten
	Hersteller
	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft

Größenbezeichnung und Länge

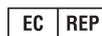
Größe			Spitzen- durch- messer	Länge (mindestens)
Taper .02	Taper .04	Taper .06		
08.02	-	-	0.08	28
10.02	-	-	0.10	
15.02	15.04	15.06	0.15	
20.02	20.04	20.06	0.20	
25.02	25.04	25.06	0.25	
30.02	30.04	30.06	0.30	
35.02	35.04	35.06	0.35	
40.02	40.04	40.06	0.40	
45.02	45.04	45.06	0.45	
50.02	50.04	50.06	0.50	
55.02	55.04	55.06	0.55	
60.02	60.04	60.06	0.60	
70.02	70.04	70.06	0.70	
80.02	80.04	80.06	0.80	
90.02	-	-	0.90	
100.02	-	-	1.00	
110.02	-	-	1.10	
120.02	-	-	1.20	
130.02	-	-	1.30	
140.02	-	-	1.40	

Größe	Spitzen- durchmesser	Länge (mindestens)
X-Fine	0.10	28
F-Fine	0.12	
M-Fine	0.14	
Fine	0.13	
F-Medium	0.16	
Medium	0.17	
M-Large	0.15	
Large	0.23	
X-Large	0.18	
F-Large	0.20	
XX-Fine	0.21	21
L-Medium	0.11	
Small	0.14	15
F-Small	0.17	17

F1	0.20	28
F2	0.25	
F3	0.30	
F4	0.40	
F5	0.50	

Bitte kontaktieren Sie uns für andere Sondergrößen.

 SURE DENT CORPORATION
#Nr. 809, 52, Sagimakgolro, Jungwon-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, Korea
Tel: +82-31-737-4720 · Fax: +82-31-737-4724
www.suredent.com

 OBELIS S.A

Bd. Général Wahis, 53, 1030 Brüssel, Belgien

Vetrieb durch:
wellsamed GmbH
Brahestraße 16 · 04347 Leipzig
Germany
www.wellsamed.com



Sollte ein schwerwiegender Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten sein, melden Sie dies bitte dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.